


Nima Köksdyna

Köksdyna i kallskum — rundad bakkant och fästband för köksstol



Dyna ovanifrån — rundad bakkant

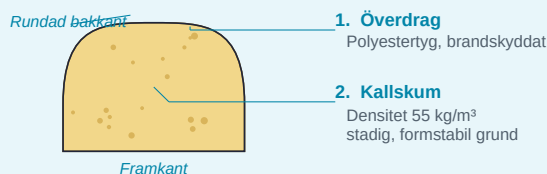

Avsedd användning

Köksdyna i kallskum avsedd för brukare som behöver en **förhöjd och bekväm sittposition** för att underlätta uppresning och ge ökad komfort vid sittande. Materialet bidrar till att leda bort värme och fukt från sittytan.

Dynan har en **rundad bakkant** som passar in i köksstolar och **fästband** som gör det enkelt att fästa dynan i stolens ryggstöd.

Användarmiljö: primärt köksstolar — kan även användas i andra sittmöbler.

Användare: brukare själv eller vård-/anhörigpersonal efter behovsbedömning.

Leverans: dynan levereras färdig att tas i bruk — ingen inställning eller justering krävs.

Material: Dynbas av kallskum (densitet 55 kg/m³). Brandskyddat överdrag av polyester med två fästband.

Så använder du dynan

1. Ta ur dynan ur förpackningen.
2. Placera dynan på köksstolen med **rundad kant bakåt** och fäst banden runt ryggstödet.
3. Kontrollera att dynans storlek passar stolens sits — välj annan storlek vid behov.
4. Dynan är klar att användas — inga justeringar behövs.

Rekonditionering & skötsel

Mellan brukare: avtorka dynbasen med desinfektion eller tvållösning 40 °C. **Maskintvätta inte dynbasen.**

Torkning: plantorka basen i torkskåp eller fritt liggande.

Överdrag: maskintvätt 60 °C, tål torktumling.

Kassering: uttjänt dyna sorteras som brännbart.

Viktigt att tänka på

- Köksdyna är **inte** en tryckavlastande dyna — välj annan dyna vid trycksårsrisk.
- Kontrollera att fästbanden är säkert knutna före användning.
- Inspektera dynan och huden regelbundet.

Brukarvikt	Max 150 kg (samtliga storlekar)
Material	Kallskum 55 kg/m ³ · Brandskyddat polyesteröverdrag
Utförande	Rundad bakkant · Två fästband · Anpassad för köksstolar.
Storlekar	Sittbredd/sittdjup enligt artikelnummer (DKHsbsd).
Vikt	0,6–1,0 kg beroende på storlek
Livslängd	Förväntad 5 år · Garanti 2 år

Tillbehör

- Standardöverdrag, polyester (*medföljer*)
- Inkontinensskyddat överdrag



Dynbas:



Överdrag:



Se sida 2 för symbolförklaring och full MDR-info.

Teknisk dokumentation och MDR-information

Kompletterande regulatorisk information enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR). Avsedd användning, konstruktion, brukarvikt, tillbehör och skötsel framgår av sida 1.

Produktidentifiering och klassificering

Artikelnummerformat: DKHsbds (där sb = sittbredd, sd = sittdjup i cm, sh sitthöjd i cm — t.ex. DKH434075).

ISO-kod: 12 25 06 — Tryckfördelande dyna (ISO 9999).

Klassificering: Medicinteknisk produkt klass I enligt MDR (EU) 2017/745.

UDI-DI: Varje storlek har eget UDI-DI enligt GS1 (GTIN). Exempel: DKH434075 → GTIN 7333376000019.

Streckkod: EAN-13.

Steril/återanvändning: Icke-steril, återanvändbar mellan brukare efter rekonditionering enligt anvisning på sida 1.

Tester och standarder

Brandtestad enligt: ISO 7176-16 (antändlighetsegenskaper hos stoppade rullstolsdelar).

Symboler: Märkning enligt EN ISO 15223-1 (medicintekniska) och ISO 3758 (textilvård).

Kvalitetsledning: Tillverkning enligt ISO 13485.

Försäkran om överensstämmelse: Tillverkaren har upprättat EU-försäkran om överensstämmelse — kontakta Nimacare AB för aktuell version.

Restriktioner och kontraindikationer

- Brukare med **förhöjd risk för trycksår** — välj tryckfördelande/tryckavlastande dyna istället.
- Brukare med befintligt trycksår på sittytan.
- Brukare med vikt över 150 kg.
- Användning på skadad dyna.

Förvaring, inspektion och miljö

- Inspektera dyna, överdrag och fästband regelbundet — skadad produkt får inte användas.
- Undvik användning nära öppen låga eller kraftig värmekälla.
- Förvara svalt och torrt.
- Dynbasen är inte vätsketät — använd inkontinensskyddat överdrag vid behov.

Anpassning

Dynan får **inte beskäras**. Vid behov av annan storlek — välj annan storlek ur sortimentet. Modifiering eller beskärning innebär att CE-märkningen upphör att gälla och att tillverkarens ansvar bortfaller.

Kvarstående risker

Köksdynan är **inte tryckavlastande** och ska inte användas av brukare med förhöjd risk för trycksår. Felaktig storlek eller löst sittande fästband kan göra att dynan glider i stolen. Brukare med nedsatt känsel eller cirkulation ska följas upp särskilt.

Rapportering av allvarliga tillbud

Allvarliga tillbud i samband med användning av produkten ska rapporteras till Nimacare AB (info@nimacare.se) samt till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad. I Sverige rapporteras tillbud till **Läkemedelsverket** (www.lakemedelsverket.se).

Tillverkare och regulatorisk kontakt

Nimacare AB

Sigurdvägen 4, 18254 Djursholm, Sverige

SRN (EUDAMED): SE-MF-000050989

Tel: +46 (0)70 635 50 70 · E-post: info@nimacare.se · Webb:

www.nimacare.se

Person ansvarig för regulatorisk efterlevnad (PRRC) enligt MDR

Art. 15 — kontakta info@nimacare.se.

Symbolförklaring

Medicintekniska symboler enligt **EN ISO 15223-1**. Tvätt- och skötselsymboler enligt **ISO 3758**.



Medicinteknisk produkt



Läs bruksanvisningen



Avtorkning — endast dynbas, ej maskintvätt



Plantorka — dynbas torkas plant



CE-märkning — uppfyller MDR (EU) 2017/745



Tillverkare



Maskintvätt 60 °C — endast överdrag



Torktumling tillåten — överdrag, normal temperatur

Dokumentinformation: Detta produktblad utgör både produktinformation och bruksanvisning i pappersform enligt MDR (EU) 2017/745, Bilaga I, avsnitt 23. Senaste revision: **2026-05-21**. Dokument-ID: NIMA-DKH-IFU-Rev2026-05-21. Vid avvikelser mellan denna version och senare publicerad version på www.nimacare.se gäller den senare. Produkten är märkt med UDI-DI på etikett — kontrollera att UDI på etiketten matchar leveransen.