

Nima Relax

Komfortabel fiberdyna för smärtekänsliga brukare — mjuk, lätt och mångsidig



Nima Relax

Fiberdyna med integrerat polyesteröverdrag

Multifunktion: kan användas som sittdyna, ryggstöd eller som mjukt stöd under andra känsliga kroppsdelar. Lätt och enkel att bära med vid förflyttning.

Konstruktion: Mycket mjuk fiberdyna fylld med **silikoniserad hålfiber** och försedd med överdrag av 100 % polyester. Den luftiga hålfiberfyllningen ger hög komfort, ger mjukt stöd och minskar lokalt tryck mot känsliga kroppsdelar. **Bidrar till ett behagligt mikroklimat** genom god luftgenomsläpplighet som hjälper till att transportera bort värme och fukt. Höjd ca 5 cm. **Mycket lätt** att bära med vid förflyttning. Tillgänglig i tre storlekar: 33×33, 40×40 och 45×45 cm.

Så använder du dynan

1. Ta ur dynan ur förpackningen.
2. Placera dynan där du behöver mjukt stöd — i sitsen, mot ryggen eller under en annan kroppsdel.
3. Dynan är klar att användas — inga inställningar behövs.

Tvätt & skötsel

Hela dynan: maskintvätt 60 °C. Tål torktumling.

Mellan brukare: tvätta hela dynan i maskin före nästa brukare.

Kassering: uttjänt dyna sorteras som brännbart.

Viktigt att tänka på

- Dynan får **inte kapas eller modifieras** — då upphör CE-märkningen att gälla.
- Inspektera huden regelbundet vid långvarigt sittande. Mjukt sittande ersätter inte regelbunden lägesändring.

Storlekar	33×33 cm · 40×40 cm · 45×45 cm
Höjd	Ca 5 cm
Material	Fyllning: silikoniserad hålfiber · Överdrag: 100 % polyester
Livslängd	Föväntad 5 år · Garanti 2 år

Artikelnummer

- NIMAREL3333
33×33 cm
- NIMAREL4040
40×40 cm
- NIMAREL4545
45×45 cm



Tvätta hela dynan:



Se sida 2 för symbolförklaring och full MDR-info.

Teknisk dokumentation och MDR-information

Kompletterande regulatorisk information enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR). Avsedd användning, konstruktion, brukarvikt, tillbehör och skötsel framgår av sida 1.

Produktidentifiering och klassificering

Artikelnummer: NIMAREL3333 (33×33 cm), NIMAREL4040 (40×40 cm), NIMAREL4545 (45×45 cm).

Klassificering: Medicinteknisk produkt klass I enligt MDR (EU) 2017/745, regel 1.

Produkttyp: Mjuk fiberdyna för komfort och stöd.

UDI-DI: Varje storlek har eget UDI-DI enligt GS1 (GTIN). Exempel: NIMAREL4545 → GTIN 07350052860989.

Streckkod: EAN-13.

Steril/återanvändning: Icke-steril, återanvändbar mellan brukare efter rekonditionering enligt anvisning på sida 1.

Tester och standarder

Material testade enligt: SS-EN 1021-1 (glödande cigarett) och SS-EN 1021-2 (öppen låga).

Symboler: Märkning enligt EN ISO 15223-1 (medicintekniska) och ISO 3758 (textilvård).

Kvalitetsledning: Tillverkning enligt ISO 13485.

Restriktioner

- Användning på modifierad eller skadad dyna.
- Vid **befintligt trycksår av kategori 3 eller 4** — kräver bedömning av legitimerad förskrivare innan användning.

Förvaring, inspektion och miljö

- Inspektera dyna och överdrag regelbundet — skadad produkt får inte användas.
- Undvik användning nära öppen låga eller kraftig värmekälla.
- Förvara svalt och torrt.

Kvarstående risker

Som med alla sittdynor kvarstår en begränsad risk för tryckskador vid långvarig oavbruten belastning eller utebliven hudkontroll.

Felaktig storlek kan öka risken för tryckskador, instabilt sittande och felställningar. Brukare med nedsatt känsel eller cirkulation ska följas upp.

Rapportering av allvarliga tillbud

Allvarliga tillbud i samband med användning av produkten ska rapporteras till Nimacare AB (info@nimacare.se) samt till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad. I Sverige rapporteras tillbud till **Läkemedelsverket** (www.lakemedelsverket.se).

Tillverkare och regulatorisk kontakt

Nimacare AB

Sigurdvägen 4, 18254 Djursholm, Sverige

SRN (EUDAMED): SE-MF-000050989

Tel: +46 (0)70 635 50 70 · E-post: info@nimacare.se · Webb:

www.nimacare.se

Person ansvarig för regulatorisk efterlevnad (PRRC) enligt MDR Art. 15 — kontakta info@nimacare.se.

Symbolförklaring

Medicintekniska symboler enligt EN ISO 15223-1. Tvätt- och skötselsymboler enligt ISO 3758.



Medicinteknisk produkt



Läs bruksanvisningen



Maskintvätt 60 °C — hela dynan



CE-märkning — uppfyller MDR (EU) 2017/745



Tillverkare



Torktumling tillåten — normal temperatur

Dokumentinformation: Detta produktblad utgör både produktinformation och bruksanvisning i pappersform enligt MDR (EU) 2017/745, Bilaga I, avsnitt 23. Senaste revision: **2026-04-15**. Dokument-ID: NIMA-RELAX-IFU-Rev2026-04-15. Vid avvikelse mellan denna version och senare publicerad version på www.nimacare.se gäller den senare. Produkten är märkt med UDI-DI på etikett — kontrollera att UDI på etiketten matchar leveransen.