

Nima 600 Spark, 600 Spark Höger och 600 Spark Vänster

Tryckfördelande dyna för brukare som förflyttar sig genom att sparka sig fram.

Dynan består av en formgjuten bas i polyuretanskum, där materialet är utskuret under ett eller båda benen för att möjliggöra en sänkt benposition och underlätta framdrivning.

Dynan finns i tre utföranden:

600 Spark Höger – utskärning på höger sida för att sänka höger ben

600 Spark Vänster – utskärning på vänster sida för att sänka vänster ben

600 Spark – utskärning på båda sidor för att sänka båda benen

Beskrivning

Dynan är en tryckfördelande allrounddyna avsedd för både aktiva och mindre aktiva brukare som inte har behov av individuella inställningar av sitsen. Den är utformad för att ge en stabil och komfortabel sittposition samt ett enkelt och användarvänligt alternativ till mer avancerade, inställningskrävande dynor.

Dynans material och konstruktion möjliggör god luftcirkulation och bidrar till ett behagligt mikroklimat.

Dynan är utformad för att fördela belastningen över en större yta och därigenom minska lokala tryckpunkter.

Produkten levereras färdig för användning och kräver ingen individuell inställning före användning.

Tillbehörsförteckning:

Ink Skyddat överdrag
Standardöverdrag luftigt
Hygienhätta

Brukarinformation / Bruksanvisning

Produkten levereras färdig för användning och innehåller inga lösa delar som kräver inställning.

Dynan ska placeras i rullstolen enligt märkningen på överdraget (fram, bak, upp, ner) för att säkerställa korrekt funktion. Det är även viktigt att korrekt sida används, så att rätt ben sänks i enlighet med vald modell (höger, vänster eller båda).

Rengöring och skötsel

Dynbasen kan ytdesinficeras med på marknaden förekommande desinfektionsmedel eller rengöras med vatten och mild tvålösning (max 40°C). Dynbasen får inte maskintvättas och ska lufttorkas.

Överdraget kan tvättas i maskin i 60°C och tål torktumling.

Dynan får inte modifieras eller beskäras, då detta kan påverka funktion samt produktens överensstämmelse med MDR (EU) 2017/745.

Avfallshantering

Uttjänt dyna sorteras som brännbart avfall i enlighet med lokala föreskrifter.

Teknisk Specifikation/varudeklARATION

Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen. Överdrag: Polyestertyg

Brandtestad enligt SS-EN 1021-1:2014 (glödande cigarett) och SS-EN 1021-2:2014 (öppen låga)

Garanti: 2 år, förväntad livslängd 5 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Kategori ISO kod 122506, Tryckfördelande dyna.

Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR (EU) 2017/745,

baserat på GS1-systemet (GTIN). Varje storlek har ett unikt UDIDI

kopplat till respektive artikelnummer. (t.ex. artikel 600SPARK4545 = GS1-kod 7333376006943)

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Brukarvikt: Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlekar större än 45x45 cm upp till 50x45 cm

Max 250 kg i storlekar 50x45 cm och större

Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som hängmattesits

För fullständiga varningar och begränsningar, se utökad bruksanvisning



Tvättråd
Överdrag:
Tvätråd
Dyna:

