



Dyna Nima 600 Tæt Mesh

Beskrivning

Dynan är avsedd för brukare som behöver en vätsketät och tryckfördelande dyna med god komfort över hela sittytan. Dynan har anatomisk form med sittgrop, dynans skum är mjukt och anpassar sig till brukaren och låter denne sjunka ned i dynan. Hela dynan består av tryckavlastande material vilket gör detta till en dyna som ger ett behagligt och tryckfördelande sittande.

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits. Dynan levereras färdig att tas i bruk utan inställning eller justering.

Dynan är avsedd att användas i rullstol och andra sittmöbler efter individuell utprovning

Överdraget är uppbyggt av en tredimensionell polyesterstruktur som skapar en mjuk, bärande yta och möjliggör effektiv transport av värme och fukt.



Tillbehörsförteckning

- Ink skyddat överdrag 3d Mesh
- Luftigt överdrag 3d Mesh

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen.
 2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
 3. Dynan kommer färdig i förpackning och kräver inga inställningar.
 4. Rengöring och skötsel: Dynan är försedd med vätsketätt ytskikt. Detta är väldigt enkelt att sprita av eller tvätta av med andra i våden förekommande medel.
- Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp. För rekonditionering mellan två brukare, följ ovan.
- 5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart

Tryckfördelande allrounddyna med anatomisk form. Dynan är täckt av ett lager polyuretanbelagd polyester vilket gör den vätsketät.

Teknisk Specifikation/varudeklaration

Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen. Dynbasen är försedd med ett vätsketätt men ånggenomsläppligt polyuretanskikt.

Överdrag: Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år, förväntad livslängd 5 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745. Medicinteknisk produkt klass I enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR)

ISO 9999: 12 25 06 – Tryckfördelande dyna

Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR (EU)

2017/745, baserat på GS1-systemet (GTIN). Varje storlek har ett unikt UDI-DI kopplat till respektive artikelnummer. (t.ex. artikel 600TM4545 = GS1-kod 7333376006905)

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2 kg beroende på storlek

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive 45x45 cm

Max 200 kg i storlekar större än 45x45 cm upp till 50x45 cm

Max 250 kg i storlekar 50x45 cm och större

Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som hängmattesits samt i hörnen bak för rullstolens rör.

Tvättråd

Dynbasen kan ytdesinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin. Pu "påsen" som täcker dynan är lätt att tex sprita av eller torka med annan desinfektion och torkar omedelbart. Överdraget tvättas i maskin i 60 grader och kan torktumlas.



Tvättråd
Överdrag:
Tvättråd
Dyna:

