



Nima Allround Skikt

Tryckavlastande allrounddyna uppbyggd i tre lager. Baslagret består av formgjutet polyuretanskum. Ovanpå detta finns i dynans bakkant ett 5 cm lager viskoelastiskt skum, samt ett 1,5 cm toppskikt av kallskum.

Polyuretanskummet bidrar till stabilitet, det viskoelastiska skummet bidrar till tryckfördelning under sittbensknöarna och kallskummet ger en jämn sittyta genom att minska eventuella kännbara övergångar mellan de olika skumlagren.

Beskrivning

Dynan är en allrounddyna avsedd för både aktiva och inaktiva brukare som inte har behov av individuella inställningar av sitsen. Den är utformad för att bidra till tryckfördelning och kan användas som ett alternativ till enklare basdynor samt till mer avancerade, inställningskrävande dynor.

Dynan är uppbyggd i tre lager och ger totalt cirka 8,5 cm mjukt material under sittbensknöarna. Den består av en 2 cm polyuretanbas, ett 5 cm lager viskoelastiskt skum samt ett 1,5 cm toppskikt. Materialen komprimeras vid belastning och anpassar sig efter kroppens form, vilket bidrar till att fördela trycket över sittytan.

Den bakre delen av dynan möjliggör en lätt nedsjunkning, vilket kan bidra till att minska framåtgäldning. Både dyna och överdrag är tillverkade av material med öppna celler som möjliggör luftcirkulation. Dynan är avsedd för användning i rullstol men kan även användas i andra typer av sitsar.

Tillbehörsförteckning

- Inkontinensskyddat överdrag
- Standardöverdrag luftgenomsläppligt

Teknisk Specifikation/varudeklaration

Dynans Bas

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Material

Dyna: Slabstockgjuten polyuretan i dynbasen, högkvalitativt trögsaum i bakkant. Toppskikt av kallskum. Allt skum har öppna celler som möjliggör luftcirkulation.

Överdrag:

Polyestertyg som möjliggör luftcirkulation.

Tvättråd

Dynbasen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin. Dynbasen lufttorkas. *Överdraget* tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Dynans vikt

0,7-1,5 kg, beroende på storlek.

Brukarvikt

Max 150 kg upp till 45x45 cm

Max 250 kg över 45x45 cm

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna.

Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR (EU) 2017/745, baserat på GS1-systemet (GTIN). Varje storlek har ett unikt UDIDI

kopplat till respektive artikelnummer. (t.ex. artikel 621SKIKT4545 = GS1-kod 7350052867216)

Märkt med EAN-13 streckkod

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men ej beskäras med bibehållen CE

Brukarinformation/bruksanvisning:

1 Dynan kommer färdig i sin förpackning, det finns inga lösa delar att ställa in. Det viktiga att tänka på är att placera dynan enligt dynans etikettering (fram, bak, upp, ner) i sitsen. Felaktig storlek, placering eller modifiering kan öka risken för tryckskador.

2 Överdraget är som standard ej inkontinensskyddat.

3 Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

4 **Destruering.** Dyna som skall destrueras sorteras under brännbart.

5 För fullständiga varningar och begränsningar, se utökad bruksanvisning