


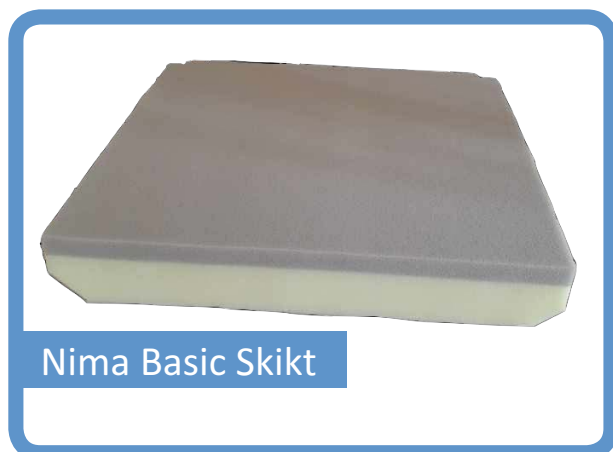

Nima Basic Skikt

Beskrivning

Nima Basic Skikt är en dyna för brukare som kan variera sitt sittande men behöver rullstol för transporter.

Nima Basic Skikt passar i såväl hängmattesits som plansits.

Överdrag och bas andas mycket väl vilket ger ett bra mikroklimat till brukaren. Skumbasens mjuka karaktär ger brukaren ett komfortabelt sittande.

Tillbehörsförteckning

- Överdrag standard ej inkontinens.
Inkontinensskyddat överdrag.

Produkten är CE Märkt, dynan kan beskäras med bibehållen CE Märkning

Dynan kan placeras i andra sittmöbler

Dyna Nima Basic Skikt

Rullstolsdyna för korttidsanvändning. Skuren kant för att passa både hängmattesits och plansits. Urtag i bakkant för rullstolens rör.

Teknisk specifikation/ Varudeklaration

Dynans Bas

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Material

Dyna: 5 cm kallskum i botten, 1,5 cm mjukare kallskum som toppskikt.

Dynan finns även som barnversion under 35 cm sittbredd, den har då 3,5 cm kallskum i botten och 1,5 cm mjukare skum som toppskikt

Överdrag: Brandskyddad polyester som andas.

Tvättråd

Dynan kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Dynans vikt

0,5-1 kg, beroende på storlek.

Brukarvikt

Max 150 kg

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och både dynan och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen.
2. Kontrollera storleken på dynan, placera enligt märkningen. Dynan kräver inga inställningar.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. **Rengöring och skötsel** Vid behov eller mellan två brukare, tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon. Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart