

Nima Ecoform Pluma Skikt Adjuster

En dyna för de som behöver en väldigt mjuk och skön dyna med stor avlastning för sittbensknölar och övriga sätesregionen. Brukare som använder rullstol dagligen, har svårt att variera sin sittställning, har stor risk att utveckla sår och/eller har behov av viss positionering och avlastning. Passar också väl för värmekänsliga brukare med stora problem med fukt i sittytan. Brukaren omsluts av dynans form, sjunker ned i det mjuka viscoelastiska skummet samt får ytterligare tryckavlastning och en sval känsla under sittbensknölarerna genom fluid gelen. Fluidgelen rör sig bort från tryck och kompenserar därmed för deformitet.

Dynan har anatomisk form med bendelare och lateralstöd. Hela dynan består av tryckavlastande material. Dynans överdrag har kardborreband fäst på undersidan, på detta kan fästas utjämningskivor för mindre justeringar av sitsen.

Fakta / Teknisk dokumentation/varudeklaration

Material Dyna: Formgjutet viscoskum i dynbasen, Gelpad under sittbensknölarerna, mjuk Polyeter i som toppskikt. Överdrag: Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16 Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03

Tryckavlastande dyna.

Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR (EU) 2017/745, baserat på GS1-systemet (GTIN). Varje storlek har ett unikt UDI-DI kopplat till respektive artikelnummer. (t.ex. artikel ECOPSAD4545 = GS1-kod 7333376005878)

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek. Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Fasad i hörnen bak för rullstolens rör.

Finns även i en version med avfasade sidor undertill för att passa i

hängmattesits, denna heter Nima Ecoform Pluma Skikt Rundad.


Höjd obelastat tillstånd: 7 cm under lår, 7,5 cm under sittbensknölar 8 cm vid bendelaren

Beställningsbara tillbehör:

Produktnamn	Art nr	Produktnamn	Storlek	Beskrivning
Abduktionskil	ABDK1	Nima Abduktionskil	2-0 cm	Bendelförhöjning, placeras på bendelaren med kardborre för att ytterligare höja denna
Främre kil	Fkil	Nima Främre Kil	25 cm djup 2,5-0,5 cm	Lutar dynan bakåt för att motverka famåtgångning/skjuvning. Denna kan beskäras för att passa dyna samt delas på halva dynans yta för att uppnå förhöjning under endast ett ben. Placeras under dynan med kardborre
Oval främre kil	OFkil	Nima Oval främre Kil	25 cm djup 3,5-2,5-0,5 cm	Lutar dynan bakåt för att motverka famåtgångning/skjuvning. Denna kan beskäras för att passa dyna samt delas på halva dynans yta för att uppnå förhöjning under endast ett ben. Placeras under dynan med kardborre. Samma funktion som ovan men oval undersida för att passa hängmattesits
Lateral kil	LKIL	Nima Lateral Kil	2-0,5 cm djup 12 cm	Placeras under dynans sidor för att luta dynan sidledes och ge lateralt stöd
Gradvis kil	Gkil	Nima Gradvis Kil	Rektangulär, 2 cm höga sidan, 0,5 låga sidorna	Sluttande kil som kan placeras i främre eller bakre hörnen på dynan för att ge extra stöd och justering
Standardöverdrag	Övxxxx	Nima Överdrag	xxx	Standardöverdrag till befintlig dyna
Ink Skyddat överdrag	ÖVINKxxx	Nima Överdrag INK	xxx	Ink överdrag till befintlig dyna
Hygienhätta	NHxxxx	Nima Hygienhätta	xxx	Hygienhätta, generell hätta som passar olika produkter

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Förvara alltid dynan plant, detta för att gelen i gelilägget inte skall flyta från ena till andra sidan.
2. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in före användning.
3. Kontrollera etiketteringen på dynan och placera enligt denna, felaktig placering eller modifiering kan öka risken för trycksador
4. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
5. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvålösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
6. Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart
7. För fullständiga varningar och begränsningar, se utökad bruksanvisning

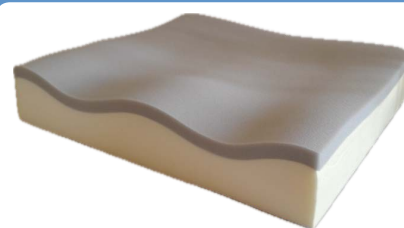

Färdig dynas bas med mjukt skum i toppskikt



Dynans bas, viscoskum med gel ilägg

Tvättråd
Överdrag:



Tvättråd
Dyna:



Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlek 45x45 upp till och inklusive 50x45

Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över.