




Nima EquaGel Adjuster

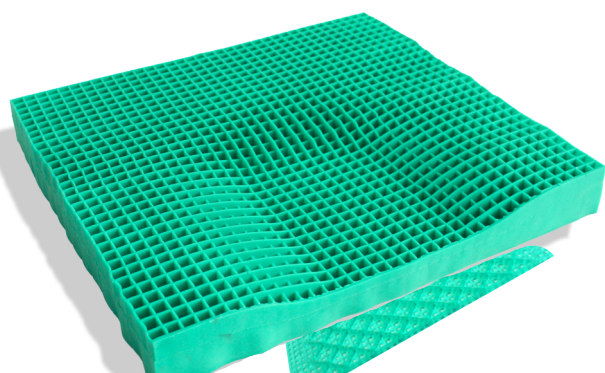

Tryckavlastande dyna i gel för längre tids sittande. Konturerad sittgrop i komfortskiktet. Lösa gel-ilägg för att kompensera assymetri. Höjd 8 cm med ilägg.

EquaGel™ är en torr polymergel som känns nästan gummiliknande vid beröring.

Den viktigaste funktionen är samarbetet cellerna emellan. Varje vägg av en cell är i stånd att stödja endast en lätt belastning, när detta tröskelvärde överskrids fördelas belastningen till omgivande väggar för stöd tills brukarens vikt tryckfördelas så jämt som möjligt över dynan.

Varje modell av EquaGel använder en tvåstegs cellstruktur. Den övre delen av dynan består av ett litet rutnät av gel som är extra känsligt för tryck, detta övre skikt kallar vi komfortskiktet. Detta övre skikt låter de delar av en brukare som behöver stöd sjunka ner i det undre skiktet som vi kallar stödsiktet. Adjuster kommer med 2 lösa gelbitar som man kan använda för att höja upp specifik del av dynan för att kompensera för asymmetri.

Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då dynan har helt öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. Kombinationen av det mjuka materialet och dynans förmåga att andas ger effektiva trycksårspåbyggande egenskaper. Materialets följsamhet gör också att dynan "gungar" i sidled vid små röresler så att skjuvkrafterna tas upp i dynan istället hos brukaren vilket minskar risken för hudrullning och andra skjuvrelaterade problem.

Utgjämningsskiva skickas gratis med dynan, denna kan användas vid hängmattesits.

Tvättråd

Dynan kan ytdesinficeras med på marknaden förekommande medel eller tvättas i maskin 40 grader, dynan måste då ligga stilla. Överdrag tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Tillbehör:

Standardöverdrag luftgenomsläppligt

Inkontinensskyddat överdrag

Utgjämningsskiva (gratis tillbehör)

Mesh Överdrag

Vikt 0,8-4,3kg beroende på storlek

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. iakttag denna märkning, det är otroligt viktigt att dynan placeras rätt.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Tag ut iläggsskivorna och placera dem där behov finns. Dessa kan med fördel delas i mitten framifrån och bak om endast ena halvan önskas för att korrigera assymetri. Dessa kan sedan placeras mellan det vita bottentyget och dynan. eller under bottentyget, mellan detta och överdraget.
4. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat, Detta då inkontinensskydd är ett skydd för dynan inte för brukaren. Det skall alltid vara ett aktivt val att beställa en dyna med skydd. Inkontinensskydd kan beställas separat till dynan i form av inkontinensskyddat överdrag.
5. **Rengöring och skötsel** Nima EquaGel Adjuster har ett tätt ytskikt. Spola eller handtvätta dynbasen och desinficera t.ex med Virkon. Plantorka dynbasen eller torka i torkskåp 40 grader. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp. Mellan två brukare bör alltid dynbas och överdrag tvättas. Notera att dynbasens och överdragets markeringar "fram bak upp ner" så att dynbasen placeras på korrekt sätt i överdraget.
6. **Destruering.** Uttjänt dyna sorteras under brännbart

Fakta/ Teknisk dokumentation

Materialspecifikation

Bas i Gelstruktur med två skikt. samt två lösa anpassningsilägg av gel.

Överdrag i brandskyddad polyester.

Storlekar Finns i sittbredder från 27cm till 50cm

storlek upp till 55x55 cm finns, dynan byggs då ut med skum

CE-märkt

Brukarvikt Max 150kg