

Produktinformation och bruksanvisning enligt MDR (EU) 2017/745
Art nr DFHxxxx (DFHsbsd)



Nima Förhöjningsdyna Coxit Halv

Förhöjningsdyna Coxit innebär att bakre halvan av dynan tillverkas av ett hårdare skum medan den främre delen tillverkas av mjukare skum. Det mjuka skummet stöder mindre mot brukaren och får därmed brukarens ben att slutta framåt.

Överdraget har ett handtag för enklare hantering.

Materialet bidrar till att leda bort värme och fukt från sittytan.

Dynan levereras färdig att tas i bruk utan inställning eller justering.

Dynan är avsedd att användas i stolar och andra sittmöbler.

Nima Förhöjningsdyna coxit halv

Teknisk dokumentation/Varudeklaration:

Dynbas av Polyeterskum, Dynbas : 55kg/m³ bak och 50 kg/m³ polyeter skum fram

Överdrag Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745, Medicinteknisk produkt klass I enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR). Tillverkaren har upprättat EU-försäkran om överensstämmelse.

Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR (EU) 2017/745, baserat på GS1-systemet (GTIN).

Varje storlek har ett unikt UDI-DI, kopplat till respektive artikelnummer (t.ex. artikel DFCH4040 = GS1-kod 07350052860613)

ISO 9999: 12 25 06 – Tryckfördelande dyna. Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 0,6-1 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

För fullständiga varningar och begränsningar, se utökad bruksanvisning

Tvättråd

Dynbasen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.

Dynbasen

lufttorkas Överdraget

tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas

Brukarvikt Max 150 kg



Tvättråd
Överdrag:



Tvättråd
Dyna:



Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen, iakttag märkningen då det är viktigt att dynan placeras korrekt. Felaktig placering kan orsaka skador.

2. Coxit = mjukare del. Kontrollera att den mjukare delen (coxit-delen) ligger åt rätt håll, framåt, i sitsen.

3. Dynans storlek skall passa rullstolens sits, om den inte passar så välj en annan storlek.

4. Rengöring och skötsel Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp. För rekonditionering mellan två brukare följ ovan.

5. Destruering. Uttjänt dyna sorteras under brännbart