

**Produktinfo och bruksanvisning enligt MDR (EU)
2017/745**



Nima Köksdyna
Coxit Halv

Köksdyna Coxit Halv innebär att bakre halvan av dynan tillverkas av ett hårdare skum medan den främre delen tillverkas av mjukare skum. Det mjuka skummet stöder mindre mot brukaren och får därmed brukarens ben att slutta framåt.

Materialet bidrar till att leda bort värme och fukt från sittytan.

Köksdyna Coxit Halv har rundad bakkant.

Detta gör att de bättre passar in i köksstolar och därav har de fått sitt namn.

Köksdynorna har små band för att det skall vara lättare att fästa dem i en köksstol.

Dynan levereras färdig att tas i bruk utan inställning eller justering

Dynan är avsedd att användas i stolar och andra sittmöbler.

Nima Köksdyna Coxit Halv

Teknisk dokumentation/Varudeklaration:

Dynbas av Polyeterskum, Dynbas : 55kg/m³ bak och 50 kg/m³ polyeter skum fram

Överdrag Polyestertyg

Brukarvikt Max 150 kg

Dynan är Brandskyddad

Medicinteknisk produkt klass I enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR). ISO 9999: 12 25 06 – Sittdyna (tryckfördelande)

Märkt med Ean-13 streckkod. CE Märkt.

Vikt 0,4-0,8 kg

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskåras med bibehållen CE

Tillbehör/reservdelar: Inkontinensskyddad Hygienhätta



Tvättråd
Överdrag:



Tvättråd
Dyna:



Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner

- 1. Tag ur dynan ur påsen.** Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen, iakttag märkningen så det är viktigt att dynan placeras korrekt.
- 2. Coxit = mjukare del.** Kontrollera att den mjukare delen (coxit-delen) ligger åt rätt håll, framåt, i sitsen.
- 3. Dynans storlek** skall passa rullstolens sits, om den inte passar så välj en annan storlek.
- 4. Rengöring och skötsel** Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp. För rekonditionering mellan två brukare följ ovan.
- 5. Destruering.** Uttjänt dyna sorteras under brännbart