

Nima Luft Hög

Beskrivning

Nima luft Hög är en skumdyna med fjäderkasett i sittropen.

Dynan är väldigt lätt och luftig samtidigt som den ger ett mjukt sittande och stöddämpning under sittbensknölna

Konstruktionen ger mycket god luftgenomsläpplighet och bidrar till att leda bort värme och fukt från sittytan.

Överdraget är ett distansöverdrag i 3D mesh vilket ger förhöjd komfort och luftighet.

Dynan levereras färdig att tas i bruk utan inställning eller justering.

Fakta / Teknisk dokumentation/varudeklaration Material

Dyna: Toppskikt av höglastisk polyeter 50 kg/m³, under detta, under sittbensknölna sitter en fjäderkasett, X pocket. Under detta ett lager hårdare polyeterskum. Botten av cellpolyeten för styvhet. Överdrag: Polyestertyg i 3d Mesh

Mått:

Höjd: 11,5 cm mätt 5 cm in från framkant under lår.

Brukarvikt:

Max 150 kg upp till och inklusive 45x45 cm

Max 200 kg i storlekar över 45x45 cm

Brandtestad enligt SS-EN 1021-1:2014 (glödande cigarett) och SS-EN 1021-2:2014 (öppen låga)

Garanti: 2 år, Förväntad livslängd 5 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745. Medicinteknisk produkt klass I enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR)

Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande

dyna. Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR

(EU) 2017/745, baserat på GS1-systemet (GTIN). Varje

storlek har ett unikt UDI-DI

kopplat till respektive artikelnummer. (t.ex. artikel

LIMALH4545 = GS1-kod 7333376006950)

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte

beskåras med bibehållen CE

Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som

hängmattesits

Tillbehörsförteckning

- Överdrag standard 3d mesh ej ink skyddat.
- Inkontinensskyddat överdrag.
- Hygienhätta



Tvättråd dyna



Tvättråd övedrag



Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
5. Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart